

Headmaster

Kopfhaltensystem

Der Headmaster, das innovative Kopfhaltensystem, gibt einen umfassenden Halt und Abstützung des Kopfes für Personen, die Ihren Kopf nur mit Einschränkungen für längere Zeit aufrecht und gegen die Schwerkraft halten können.

Das Gewicht des Kopfes wird am Unterkiefer aufgenommen und mittels der speziellen Konstruktion des Headmasters auf dem Brustbein abgestützt.

Indiziert ist der Headmaster bei

- ALS
- Neuromuskulären Erkrankungen
- SMA
- DMD (Duchenne Muskeldystrophie)
- Hypotoner Zerebralparese
- Querschnittlähmung im hohen Halsmarkbereich
- und weitere Erkrankungen, bei denen der Kopf nur mit Einschränkungen für längere Zeit aufrecht und gegen die Schwerkraft gehalten werden kann.

Vorteile

- verbessert die Teilhabe
- verbessert den Blickkontakt
- erleichtert das Schlucken
- erleichtert bei einigen Nutzern das Atmen
- reduziert Nackenschmerzen, die aufgrund der Fehlhaltung hervorgerufen werden

Handhabung

- leicht anzulegen
- einfach den individuellen Bedürfnissen des Nutzers anzupassen

Tragekomfort

- Latexallergien haben in den zurückliegenden Jahren zugenommen. Unser Headmaster ist latexfrei.
- unterschiedliche Größen
- unterschiedliche Module
- sinnvolles Zubehör

Das Maßnehmen

- Für die Auswahl des Headmasters ist das Maß „a“ entscheidend.
- Dieses Maß erheben Sie von der Spitze des Kinns zum Scheitelpunkt des Unterkieferbogens.
- Liegt Ihnen dieses Maß vor, können Sie den richtigen Headmaster auswählen.



So kann der Kopf ohne Anstrengung meist im Lot und die Augenlinie horizontal gehalten werden. Eine bessere Teilhabe und Kommunikation mit dem Umfeld ist so möglich. Trinken, Essen und Schlucken ist bei einer besseren Haltung des Kopfes leichter.

Unterschiedliche Führungselotten können integriert werden, um zusätzlich Halt zu geben.



Headmaster



Bestell-Nr.:	Beschreibung	Mengeneinheit
HM-LF-01	Headmaster Kopfhaltssystem Grau/L – groß (13 cm)	Stück
HM-LF-02	Headmaster Kopfhaltssystem Grau/M – mittel (11,5 cm)	Stück
HM-LF-03	Headmaster Kopfhaltssystem Grau/S – klein (10 cm)	Stück
HM-LF-04	Headmaster Kopfhaltssystem Grau/Junior (9 cm)	Stück
HM-LF-05	Headmaster Kopfhaltssystem Grau/Kinder (7,5 cm)	Stück
HM-LF-06	Headmaster Kopfhaltssystem Grau/Kleinkinder (6,5 cm)	Stück

Ersatznackengurt

Bestell-Nr.:	Beschreibung	Mengeneinheit
HM-NG-01	Ersatznackengurt passend für Headmaster, Größe L und M (HM-LF-01 & HM-LF-02) Grau/L – groß	Stück
HM-NG-02	Ersatznackengurt passend für Headmaster, Größe S und Junior (HM-LF-03 & HM-LF-04) Grau/S – klein	Stück
HM-NG-03	Ersatznackengurt passend für Headmaster, Größe Kind und Kleinkind (HM-LF-05 & HM-LF-06) Grau/XS – extra klein	Stück

Ersatzkinnpolster

Bestell-Nr.:	Beschreibung	Mengeneinheit
HM-KP-01	Ersatzkinnpolster passend für Headmaster, Größe L und M (HM-LF-01 & HM-LF-02) Grau/L – groß	Stück
HM-KP-02	Ersatzkinnpolster passend für Headmaster, Größe S und Junior (HM-LF-03 & HM-LF-04) Grau/S – klein	Stück
HM-KP-03	Ersatzkinnpolster passend für Headmaster, Größe Kind und Kleinkind (HM-LF-05 & HM-LF-06) Grau/XS – extra klein	Stück

Zubehör

Nackенpolster



Bestell-Nr.:	Beschreibung	Mengeneinheit
HM-NP-01	Nackенpolster passend für Headmaster, Größe L und M (HM-LF-01 & HM-LF-02) Grau/L – groß	Stück
HM-NP-02	Nackенpolster passend für Headmaster, Größe S und Junior (HM-LF-03 & HM-LF-04) Grau/S – klein	Stück
HM-NP-03	Nackенpolster passend für Headmaster, Größe Kind und Kleinkind (HM-LF-05 & HM-LF-06) Grau/XS – extra klein	Stück

Paravertebrale Polster



Bestell-Nr.:	Beschreibung	Mengeneinheit
HM-PV-01	Paravertebrale Polster passend für Headmaster, Größe L und M (HM-LF-01 & HM-LF-02) Grau/L – groß	Paar
HM-PV-02	Paravertebrale Polster passend für Headmaster, Größe S und Junior (HM-LF-03 & HM-LF-04) Grau/S – klein	Paar
HM-PV-03	Paravertebrale Polster passend für Headmaster, Größe Kind und Kleinkind (HM-LF-05 & HM-LF-06) Grau/XS – extra klein	Paar

Ventrale Abstützung



Bestell-Nr.:	Beschreibung	Mengeneinheit
HM-VA-01	zusätzliche ventrale Abstützung passend für Headmaster Größe L und M (HM-LF-01 & HM-LF-02) Grau/L – groß	Stück
HM-VA-02	zusätzliche ventrale Abstützung passend für Headmaster Größe S und Junior (HM-LF-03 & HM-LF-04) Grau/S – klein	Stück
HM-VA-03	zusätzliche ventrale Abstützung passend für Headmaster Größe Kind und Kleinkind (HM-LF-05 & HM-LF-06) Grau/XS – extra klein	Stück

Bestellbogen

Headmaster Kopfhaltensystem

Bitte per Fax an: (0 61 03) 7 06 42 - 39

Patientendaten	Name:	
	Telefon:	Alter:
	Diagnose:	Körpergewicht:
	Klinik/Einrichtung:	rezept. Arzt:
	Orthopädie-/Rehatechniker:	Datum/Maß gen. am:

Headmaster Kopfhaltensystem (Latex frei)

Bestell-Nr.:	Größe	Maß (cm)	Bestellmenge
HM-LF-01	L	13	
HM-LF-02	M	11,5	
HM-LF-03	S	10	
HM-LF-04	Junior	9	
HM-LF-05	Kind	7,5	
HM-LF-06	Kleinkind	6,5	



Abgabe/Einweisung:

Der Headmaster sollte von einem Orthopädie- oder Rehatechniker, d.h. von Fachpersonen angepasst und eingestellt werden, die den richtigen Sitz und die Haltung des Systems beurteilen und entsprechende Anpassungen vornehmen können.

Achtung:

Da die Aufnahme das Gewicht des Kopfes über den Unterkiefer auf das Brustbein überträgt, ist es wichtig, dass der Nutzer eine weitgehend intakte Zahnreihe hat, damit das Gewicht des Kopfes auch auf den Zähnen ruhen kann.

Anpassen der Halskrause

Formen Sie die Halskrause mit Ihren Händen in die gewünschte Weite und Höhe.



Wenn erforderlich, sparen Sie die Schlüsselbeine aus, so dass der Druck auf das Brustbein und den Brustkorb geleitet wird. Die Auflage am Brustbein kann, wenn erforderlich, zusätzlich abgepolstert werden.



Zubehör

Nackenpolster



Bestell-Nr.:	Beschreibung	Bestellmenge
HM-NP-01	Nackenpolster passend für Headmaster Größe L und M (HM-LF-01 & HM-LF-02) Grau/L – groß	
HM-NP-02	Nackenpolster passend für Headmaster Größe S und Junior (HM-LF-03 & HM-LF-04) Grau/S – klein	
HM-NP-03	Nackenpolster passend für Headmaster, Größe Kind und Kleinkind (HM-LF-05 & HM-LF-06) Grau/XS – extra klein	



Paravertebrale Polster

Bestell-Nr.:	Beschreibung	Bestellmenge
HM-PV-01	Paravertebrale Polster passend für Headmaster Größe L und M (HM-LF-01 & HM-LF-02) Grau/L – groß	
HM-PV-02	Paravertebrale Polster passend für Headmaster Größe S und Junior (HM-LF-03 & HM-LF-04) Grau/S – klein	
HM-PV-03	Paravertebrale Polster passend für Headmaster, Größe Kind und Kleinkind (HM-LF-05 & HM-LF-06) Grau/XS – extra klein	

Ventrale Abstützung



Bestell-Nr.:	Beschreibung	Bestellmenge
HM-VA-01	zusätzliche ventrale Abstützung passend für Headmaster Größe L und M (HM-LF-01 & HM-LF-02) Grau/L – groß	
HM-VA-02	zusätzliche ventrale Abstützung passend für Headmaster Größe S und Junior (HM-LF-03 & HM-LF-04) Grau/S – klein	
HM-VA-03	zusätzliche ventrale Abstützung passend für Headmaster Größe Kind und Kleinkind (HM-LF-05 & HM-LF-06) Grau/XS – extra klein	

Bestellung erfolgt gemäß den AGB der Pro Walk GmbH

Stempel/Unterschrift:

Achtung Rücknahmebedingungen:

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung, dass es sich bei dem Kopfhaltssystem Headmaster um einen hygienesensiblen Artikel handelt.

Ist die Originalpackung beschädigt und/oder geöffnet, nehmen wir diesen Artikel nicht mehr zurück. Ebenso ist dieser dann auch vom Umtausch ausgeschlossen.

Datum: Ansprechpartner: