

# Flex-Protect®

Flex-Protect® – eine neue Form des postoperativen Kopfschutzhelms. Speziell konzipiert zur Versorgung von Patienten nach Eröffnung des Schädelknochens bei neurochirurgischen Eingriffen, nach Schädel-Hirn-Trauma u.a.



Unterschiedliche Helmgrößen gestatten eine Anpassung des Flex-Protect®-Helms direkt vor Ort, selbst auf der Intensivstation. Der weiche Kunststoff nimmt geringe Kräfte auf, schützt die OP-Wunde und das Gehirn dort, wo z.B. der Schädelknochen entnommen wurde.

Flex-Protect®-Helme sind mit speziellen Klettverschlüssen und Kinnriemen versehen, die eine Anpassung auch an die wechselnde Wundauflage bis zu einem gewissen Grad erlauben. Ein passgenauer Sitz lässt sich auf diese Weise erzielen. Bei unruhigen Patienten, bzw. Patienten, die nicht kooperativ sein können, raten wir zwingend immer den Kinnriemen geschlossen zu halten, um den Sitz des Flex-Protect®-Helms sicherzustellen.

Vorgebohrte Öffnungen der Flex-Protect®-Helme unterstützen die Luftzirkulation.

Ein Gipsabdruck des Kopfes, der mit Belastung und Risiken für den Patienten verbunden sein kann, ist nicht erforderlich.

Der Flex-Protect®-Helm lässt sich z.B. mit einer Lederschere ohne aufwendiges weiteres Werkzeug individuell anpassen.

Verschiedene Helmgrößen sind verfügbar.

#### **Flex-Protect®-Helme sind indiziert bei:**

- Postoperativer Kraniotomie oder Kraniektomie
- Rekonstruktion des Schädelknochens und weiterer Schädeloperationen
- Verhaltensstörungen mit Selbstverletzungen wie das Ausreißen der Haare, stereotypes Schlagen mit den Händen auf den Kopf u.a.

#### **Kontraindikationen:**

- Patienten, die dazu neigen sich Gesichtsverletzungen zuzuziehen
- Personen, die einen Schutzhelm benötigen, der hohe einwirkende Kräfte absorbiert (Anfallsleiden, Sturzneigung u.a.)

Folgende Größen der **Flex-Protect®-Helme** sind verfügbar:

Artikelnr.	Beschreibung	Kopfumfang	Mengeneinheit	HMV-Nr.*
Protect-011	Flex-Protect®-Kopfschutzhelm für Kinder <b>Blau/S - klein</b>	40 – 43 cm	Stück	99.17.01.0XXX
Protect-012	Flex-Protect®-Kopfschutzhelm für Kinder <b>Blau/M - mittel</b>	43 – 46 cm	Stück	99.17.01.0XXX
Protect-013	Flex-Protect®-Kopfschutzhelm für Kinder <b>Blau/L - groß</b>	46 – 48 cm	Stück	99.17.01.0XXX
Protect-014	Flex-Protect®-Kopfschutzhelm für Kinder <b>Blau/XL - extra groß</b>	48 – 51 cm	Stück	99.17.01.0XXX
Protect-015	Flex-Protect®-Kopfschutzhelm für Erwachsene <b>Blau/XS - extra klein</b>	51 – 53 cm	Stück	99.17.01.0XXX
Protect-016	Flex-Protect®-Kopfschutzhelm für Erwachsene <b>Blau/S - klein</b>	53 – 56 cm	Stück	99.17.01.0XXX
Protect-017	Flex-Protect®-Kopfschutzhelm für Erwachsene <b>Blau/M - mittel</b>	56 – 58 cm	Stück	99.17.01.0XXX
Protect-018	Flex-Protect®-Kopfschutzhelm für Erwachsene <b>Blau/L - groß</b>	58 – 61 cm	Stück	99.17.01.0XXX
Protect-019	Flex-Protect®-Kopfschutzhelm für Erwachsene <b>Blau/XL - extra groß</b>	61 – 64 cm	Stück	99.17.01.0XXX
Protect-020	Flex-Protect®-Kopfschutzhelm für Erwachsene <b>Blau/XXL - extra groß</b>	64 – 66 cm	Stück	99.17.01.0XXX

\*HMV-Nr. in Vorbereitung

**Pro Walk**  
**Rehabilitationshilfen und Sanitätsbedarf GmbH**  
 Woogstraße 48, D-63329 Egelsbach  
 Telefon: (0 61 03) 7 06 42 - 0, Telefax: (0 61 03) 7 06 42 - 39  
 E-Mail: info@prowalk.de