

AirPro

Lagerung und Kontrakturbehandlung sanft, schonend und effektiv

Die Dynamischen Lagerungsorthesen AirPro sind zur Lagerung und Kontrakturbehandlung für unterschiedliche Gelenken entwickelt worden.

Die Lufttaschen der AirPro werden mit einer speziellen Handpumpe bis zu dem Punkt gefüllt, der zuvor festgelegt wurde. Dies ist der Punkt, an dem bei Streckung des Gelenks der ersten Widerstand gegen die Streckung zu spüren ist. Diese erreichte Position gestattet einen sanften, bis zu einem gewissen Punkt auch überwindbaren Druck in die Streckstellung des Gelenks. Lang anhaltende Dehnungen sind gut tolerabel, wenn diese unmerklich appliziert werden.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Orthesenversorgung mit der Dynamischen Orthese AirPro ist, dass die verkürzten Weichteile und Muskeln gut auf Dehnung ansprechen.




AirPro Orthesen ist indiziert bei:

- Weichteilverkürzungen und Kontrakturen, die gut auf Dehnung ansprechen
- Nach Schlaganfall
- Nach Schädel-Hirn-Verletzung
- Nach Hirnblutung
- Nach Hirninfarkt
- Nach Hirnentzündung
- Nach eingriffen am ZNS
- Nach zentralen Ereignissen, die zu Tonuserhöhung und Muskelverkürzung führen oder bereits geführt haben
- Post OP zur Sicherung des Operationsergebnisses
- Post OP zur Sicherung z.B. der Hüftabspreizung nach Totalendoprothese des Hüftgelenks um einer Adduktion der Hüfte zu vermeiden



Anwendungsbeispiel AirPro® Dynamische Finger Handgelenksorthesen

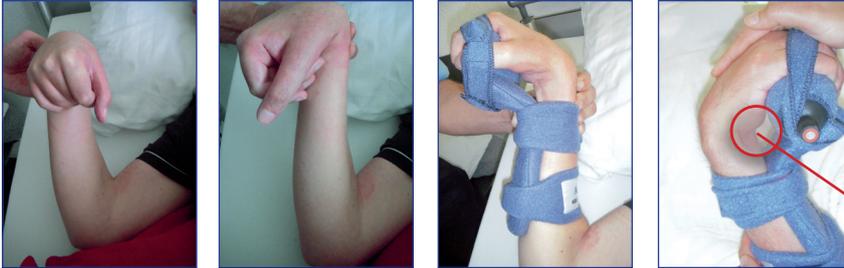

Größe	Art. Nr.
Kinder	AP-DH-S-1001
M	AP-DH-M-1002

Entlastung Haut auf Haut

Anwendungsbeispiel AirPro® Dynamische Finger Hand Orthesen bei ausgeprägter Fehlstellung der Finger und der Hand, hier ausschließlich Handmodul



Größe	Art. Nr.
Kinder	AP-DF-S-1010
M	AP-DF-M-1020

Öffnen der Hand und Entlastung Haut auf Haut in der Hautfalte

Anwendungsbeispiel AirPro® Dynamische Kniegelenksorthesen



Anwendungsbeispiel AirPro® Dynamische Ellenbogenorthese



Handhabung ähnlich wie bei der Versorgung im Bereich der Kniebeuge

AirPro® Dynamische Kniegelenksorthesen

Größe	Umf. Oberschenkel	Umf. Unterschenkel	Art. Nr.
S	300 mm – 380 mm	200 mm – 280 mm	AP-DK-S-3001
M	380 mm – 455 mm	300 mm – 380 mm	AP-DK-M-3002
L	455 mm – 560 mm	380 mm – 480 mm	AP-DK-L-3003

AirPro® Dynamische Ellenbogenorthese

Größe	Umfang Oberarm	Umfang Unterarm	Art. Nr.
S	200 mm – 255 mm	200 mm – 255 mm	AP-DE-S-2001
M	230 mm – 290 mm	230 mm – 290 mm	AP-DE-M-2002
L	280 mm – 355 mm	280 mm – 355 mm	AP-DE-L-2003

Anwendungsbeispiel der AirPro Dynamischen Hüft-führungsorthesen



AirPro® Dynamische Hüftgelenksorthesen

Größe	Umfang 10 cm oberhalb des Knies	Art. Nr.
M	280 mm – 455 mm	AP-DO-M-4001
L	480 mm – 685 mm	AP-DO-L-4002