


Maßnahmen bei einer Pro Walk Schulter-Sublux-Orthese

- 1) Maße im Liegen nehmen, mit Schulter und Arm locker neben dem Körper positioniert.
- 2) □ sind Längenmaße und ○ sind Umfangsmaße.
- 3) Alle Maße sind Hautmaße.
- 4) Das Maß R1/L1 ist beginnend am Halsansatz bis an die Stelle der Schulter zu nehmen, wo diese anfängt sich zu krümmen.
- 5) Die Maße R2/L2 sowie R3/L3 sind als Hautmaße durch die Achsel ohne Zugabe zu nehmen.
- 6) Das Maß R6/L6 bzw. R8/L8 (Orthesen-Abschluss) bitte mit Maßzugabe von 10 mm versehen.
- 7) Die Umfangsmaße B und N sind in der „Atemmittellage“ zu nehmen, d.h. das Mittelmaß zwischen Ein- und Ausatmung.
- 8) Für weibliche Patienten bitte die BH Größe angeben und bei der Bemaßung entsprechend berücksichtigen.

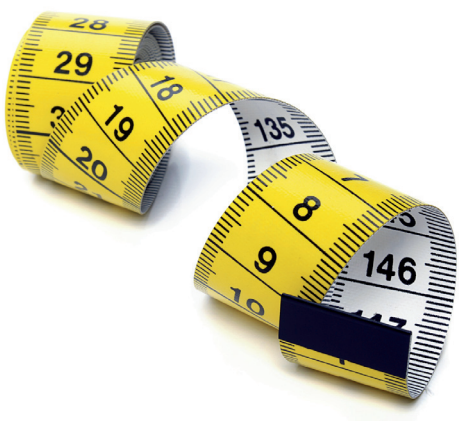

Die Pro Walk Schulter-Sublux-Orthese

