

Für wen ist es geeignet?

SaeboStep eignet sich für Menschen, die unter einer Fußheberschwäche oder einem sogenannten Fallfuß leiden. Grund dafür kann beispielsweise ein Bandscheibenvorfall sein oder eine andere Erkrankung, durch die die Nerven und Muskeln im Fußbereich nicht mehr präzise angesteuert werden. SaeboStep lässt sich auch bei beidseitiger Lähmung einsetzen.



Saebo Inc.
Six Lake Point Plaza, 2725 Water Ridge
Parkway Suit, US - 28217 Charlotte NC



European Healthcare and Device Solutions Ltd
Stratton House, Bishopstown Road
Cork, T12 Y9TC, Ireland

Vertrieb durch:

PRO WALK

Rehabilitationshilfen und Sanitätsbedarf GmbH

Paul-Ehrlich-Str. 3 – 5, D-63225 Langen

Tel.: (0 61 03) 7 06 42-00, Fax: (0 61 03) 7 06 42-39

E-Mail: info@prowalk.de



Pro Walk GmbH




@pro_walk

**Ihr
SaeboStep
Partner
vor Ort:**

Stempel

© Pro Walk PM-PW-SaeboStep-Flyer-02/23

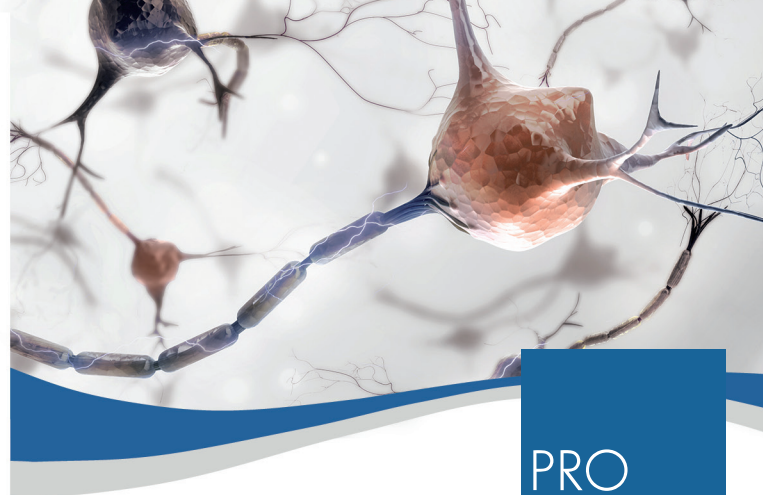

**PRO
WALK**

SaeboStep



www.prowalk.de

Was ist das eigentlich?

Mit SaeboStep können Sie bei einer Fußheberschwäche wieder besser gehen. Es handelt sich um eine Orthese, die einfach oberhalb des Sprunggelenks mit einer Gamasche befestigt wird. Zwischen Schuh und Orthese spannen sich stabile Züge. Sie sorgen dafür, dass der Fuß immer mindestens den 90-Grad-Winkel hält.

Wo liegen die Vorteile?

- Endlich wieder die Lieblingsschuhe tragen: Ob Turnschuh oder Halbschuh – mit SaeboStep können Sie dank unserer Anpassung in Ihren Schuhen (weiter-)laufen.
- Fast unsichtbar: Unter langen Hosenbeinen oder Kleidern verschwindet die Orthese vollständig. Nur die Züge zum Schuh sind noch sichtbar.
- Einfach einzustellen: Die nötige Spannung des Zugs lässt sich über ein Drehrad ganz einfach einstellen.



Wie funktioniert es genau?

Zunächst werden in Ihre Schuhe etwa auf Höhe des Spanns zwei Ösen fest und stabil eingearbeitet. Ist dies geschehen, wird eine Manschette oberhalb des Knöchels angelegt und mit einem speziellen Magnetverschluss und dem dort befindlichen Drehrad verschlossen. An der Manschette sind zwei Züge angebracht, die in die Ösen des Schuhs eingehakt werden. Mit einem Drehrad lässt sich die Spannung des Zuges exakt regeln: Der Fuß wird genau in dem Winkel gehalten, der für Sie optimal ist.

Vereinbaren Sie eine unverbindliche Beratung!

