


Maßnahmen bei einer Pro Walk Schulter-Sublux-Orthese

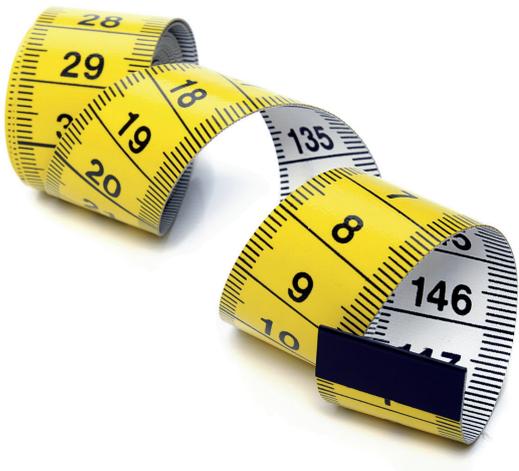

1. Maße sind im Liegen zu nehmen, Schulter und Arm locker neben dem Körper positioniert.
2. Die subluxierte Schulter ist zu reponieren. Die Schultern sollten symmetrisch und der Kopf gerade in der Mitte ausgerichtet sein.
3. Alle Maße, bis auf R/L2 und R/L3, sind als Hautmaß zu nehmen.
4. Die Maße R2/L2 sowie R3/L3 sind als Zugmaß durch die Achsel ohne Zugabe zu nehmen. Bitte bei beiden Maßen den Verlauf des Maßbandes sorgfältig überprüfen.
5. Das Maß R1/L1 sind beginnend vom Halsansatz bis an die Stelle der Schulter zu nehmen, wo diese anfängt sich zu krümmen und die Maße R/L3 genommen werden.
6. Den ausgewählten Armabschluss bitte mit einer Maßzugabe von 5 % versehen.
7. Die Umfangsmaße B und N sind in der „Atemmittellage“ zu nehmen.
8. Das Maß C sollte nicht zu klein gewählt werden, um genügend Auflagefläche zu gewährleisten.
9. Der zweigeteilte Verschluss mit Baumwolleinsatz für Damen ist nur bei Körbchengröße A und B möglich. Bei größeren Oberweiten muss ein BH getragen werden.



Pro Walk GmbH

Paul-Ehrlich-Str. 3 – 5, D-63325 Langen

Telefon: (0 61 03) 7 06 42 - 00

Telefax: (0 61 03) 7 06 42 - 39

E-Mail: info@prowalk.de

www.prowalk.de

**Die Pro Walk Schulter-
Sublux-Orthese**